

ВЫСОКОТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА скрытой крови в кале тест-система COMBO

Тест «COMBO» РYКК – это:

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ
ОПРЕДЕЛЯЕТ 2 МАРКЕРА:
гемоглобин и гаптоглобиновый
комплекс

- Предварительная топическая диагностика поражения ЖКТ
- Высокая чувствительность и положительная прогностическая ценность для аденом и карцином, подтвержденная независимыми исследованиями

ТЕСТ УСИЛЕН ГАПТОГЛОБИНЫМ
КОМПЛЕКСОМ

- Выявляет кровотечения из верхних отделов ЖКТ
- 100% чувствительность для колоректального рака*
- Более информативная, по сравнению с другим используемым маркером (трансферрином) молекула
- Более устойчивая к деградации молекула, по сравнению с гемоглобином

ТЕСТ СПЕЦИФИЧЕН ТОЛЬКО К
ИНТАКТНОМУ ГЕМОГЛОБИНУ И
ГАПТОГЛОБИНОВОМУ КОМПЛЕКСУ

- Не требует от пациента соблюдения диеты
- Не реагирует на неизмененные эритроциты, попавшие в стул из перианальной зоны

УВЕЛИЧИВАЕТ ПОТОК НА
ГАСТРОСКОПИЮ И КОЛОНОСКОПИЮ

- 200 0000 руб - заработок медицинского центра при использовании одного набора
- Повышает рентабельность эндоскопического кабинета
- Повышает мотивацию пациента к прохождению колоноскопии и лучшей подготовке кишечника




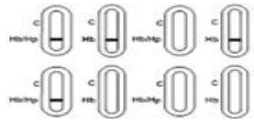
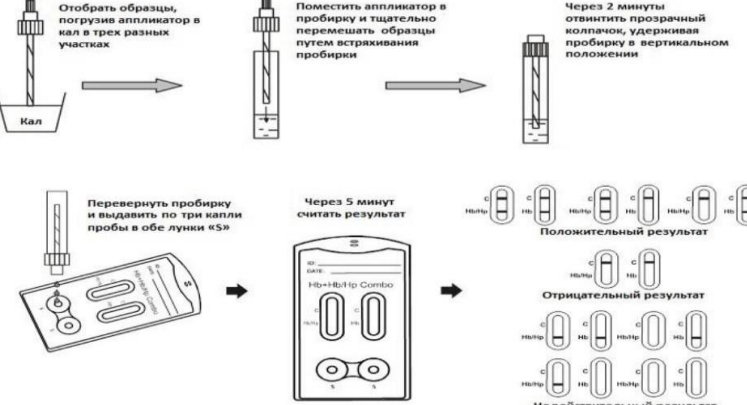
Аналитическая чувствительность гемоглобин/гаптоглобин - 50 мкг/л
гемоглобин – 50 мкг/л

Точность 98%
Аналитическая специфичность 100%

Комплект для пациента удобная бумага для сбора
гигиеничная пробирка

Набор 30 тестов

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА В ЛАБОРАТОРИИ

Считывание и интерпретация результатов:	Иллюстрация проведения экспресс-анализа:
 <p>При положительном результате экспресс-анализа проявляются окрашенные полосы в тестовой зоне «Нб» и/или в тестовой зоне «Нр/Нр», а также в контрольных зонах «С».</p> <p>При отрицательном результате экспресс-анализа проявляются окрашенные полосы только в контрольных зонах «С».</p> 	 <p>Отобрать образцы, погрузив аппликатор в кал в трех разных участках</p> <p>Поместить аппликатор в пробирку и тщательно перемешать образцы путем встряхивания пробирки</p> <p>Через 2 минуты отвинтить прозрачный колпачок, удерживая пробирку в вертикальном положении</p> <p>Провернуть пробирку и выдать по три капли пробы в обе лунки «С»</p> <p>Через 5 минут считать результат</p> <p>Положительный результат</p> <p>Отрицательный результат</p> <p>Недействительный результат</p>

4 ПЛЮСА В ПОЛЬЗУ ЗАКАЗА ТЕСТ-СИСТЕМЫ У НАС

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА НА ТЕСТ-СИСТЕМЫ

→ собственное производство тестов, локализованное в России

СТАБИЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

→ постоянное наличие товара на складе

ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ

→ решим вопрос с доставкой тест-систем, учитывая график работы учреждения и условия хранения

ПОЛНОЦЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

→ разработка аукционной документации (ФЗ-44), работа с прямыми договорами, участие в аукционах